

UNE RÉVOLUTION DANS LA MESURE DE LA HbA1c



Analyseur entièrement
automatisé

rapide et précis

Simplicité d'utilisation

Obtention des résultats
en 4 minutes seulement

EKF
DIAGNOSTICS

SIMPLIFIER LA SCIENCE

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Fonctions conviviales limitant le temps de formation
- Instructions étape par étape à l'écran
- Langue sélectionnable par l'utilisateur
- 4 µl de sang prélevé sur bout du doigt ou d'échantillon veineux suffisent
- Dispositif de prélèvement sanguin innovant permettant un échantillonnage simple et homogène

RAPIDE ET PRÉCIS

- Résultats en 4 minutes
- Exploite la méthodologie de l'affinité pour le boronate, dont il est largement admis qu'elle ne génère aucune interférence
- Plage de mesure : 4-15 % d'A1c (DCCT)
- Imprécision : CV < 3 % à 7 % d'A1c (DCCT)
- Aucune influence des variantes de la Hb, la durée de vie des érythrocytes n'est donc pas réduite
- Traçabilité selon la méthode de référence de l'IFCC

GESTION EFFICACE DES DONNÉES

- Lecteur de code-barres permettant de scanner les données d'étalonnage, ainsi que les ID du patient et de l'opérateur
- Mémoire jusqu'à 7000 résultats
- Création de rapport à double présentation sélectionnable par l'utilisateur. L'utilisateur peut choisir entre % DCCT, IFCC mmol/mol, eAG mg/dl or eAG mmol/l
- Port USB
- Imprimante pour étiquettes disponible en option


ERGONOMIE

- Compact : 95 x 205 x 135 mm (h x L x p)
- Léger : 0,7 kg



1

Scannez le code-barres d'étalonnage du lot. Retirez le sachet de la cartouche, puis insérez ce dernier dans l'analyseur.

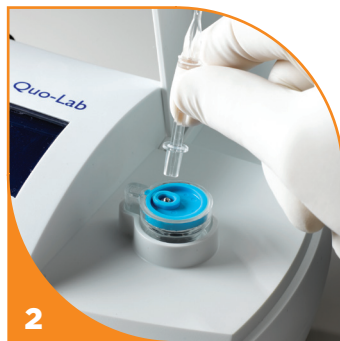

2

Lorsque vous y êtes invité, enfoncez la bille de réactif dans la cartouche avec le revers de l'outil d'échantillonnage.



3

Insérez l'outil d'échantillonnage dans la cartouche et enclenchez la poignée.



4

Fermez le couvercle de l'analyseur. Les résultats s'affichent en 4 minutes.

Mesure de la HbA1c économique, précise et fiable



Distributeur

Fabricant

Quotient Diagnostics Ltd
 Russell House, Molesey Road,
 Walton-on-Thames, Surrey,
 Royaume-Uni KT12 3PE
Tél. +44 (0)1932 220 124



Certifié
 ISO13485: 2003.
 Enregistrement n° :
 MD 505902

Service commercial

EKF Diagnostics Holdings plc
 Avon House, 19 Stanwell Road,
 Penarth, Cardiff, Royaume-Uni CF64 2EZ
Tél. +44 (0)29 20 710 570
www.ekfdiagnostics.com



SIMPLIFIER LA SCIENCE